

DAMACRYL 910 تعليمات الاستخدام

لتجنب تلف رؤوس الابر او منطقة دمج الخيط بالإبرة، يتم قبض الابرة من ثلث الى نصف المسافة من نهاية منطقة اتصال الابرة بالخيط حتى رأس الابرة. إعادة تشكيل الابرة قد يسبب بخسارة قوتها وتصيح أقل مقاومة للثني والكسر.

يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع الابر الجراحية لتجنب حدوث وخزات غير مقصود بها.

تخلص من الابر المستخدمة في حاوية الأدوات الحادة.

تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية او متزايدة.

لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

التأثيرات الجانبية :

التأثيرات الضارة التي يمكن حصولها عند استخدام هذا المنتج تشمل تفزر الجروح، الفشل في توفير الدعم الكافي للجروح بأغلاق المناطق التي يحدث فيها توسع أو تمدد أو انتفاخ، الفشل في توفير الدعم الكافي للمسنين و مرضى سوء التغذية أو الوهن أو المرضى الذين يعانون من حالات قد تؤدي إلى تأخير شفاء الجروح، العدوى الانتانية، حد منخفض من رد فعل التهابي حاد للأنسجة، تهيج موضعي عند ترك الخيوط لفترة أكثر من سبعة أيام، طرد الخيط أو تأخر الامتصاص في الأنسجة ذات التروية الدموية المنخفضة، تشكل حصى في القنوات البولية و الصفراوية عند حدوث تماس لفترة طويلة مع المحاليل الملحية مثل البول و الصفراء و تهيج موضعي مؤقت في موضع الجرح.

الابر المنكسرة قد تؤدي الى عمليات جراحية مديدة أو إضافية أو بقاء اجزاء من أجسام غريبة، الوخزات غير المقصودة مع الابر الملوثة قد يؤدي الى انتقال مسببات الامراض المنقولة بالدم.

التعقيم :

خيوط **داماكريل 910** معقمة بواسطة أكسيد الإيثيلين.

التعقيم يبقى محفوظ فقط عند فتح المنتج تحت ظروف عقيمة.

لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج.

لا تستخدم المنتج إذا كان الغلاف مفتوح او تالف.













تخلص من الخيوط المفتوحة غير المستخدمة.

التخزين :

أبقي المنتج بعيداً عن الرطوبة و الحرارة المباشرة و يوصى ان تكون الظروف

التخزينية تحت 25 درجة مئوية، لا تستخدمه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

الرموز المستخدمة على المنتج

	لا يعاد استخدامه		تاريخ التصنيع
	منتج معقم بواسطة أكسيد الإيثيلين		تاريخ انتهاء الصلاحية
	لا يعاد تعقيمه لمرة ثانية		رقم الدفعة
	حدود درجة الحرارة		تجنب الرطوبة
	اقرأ التعليمات قبل الاستخدام		تجنب اشعة الشمس المباشرة
	اسم المصنع		لا يستخدم اذا كان الغلاف مفتوح او تالف

صنع من قبل :

GMD GROUP MEDİKAL SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

IKITELLI OSB MAH. ISDOK
SOSYAL TESIS 2 SK. B BLOK 1 B
7 BASAKSEHIR/ ISTANBUL
Info@gmdgroup.com.tr
www.gmdgroup.com.tr



داماكريل 910 :

بولي غلاكتين 910

خيوط مطلي (مغلف)، مضفور متعدد الليف

خيوط جراحية ممتصة ومعقمة

الوصف :

خيوط **داماكريل 910** هي خيوط جراحية صناعية، ممتصة ومعقمة، مكونة من بوليمير تشاريكي أعد وصنع من 90% غليكوليد و 10% لكتيد (مستمد من الغلاكتيك وحمض اللاكتيك). هذه الخيوط مضفورة، مصبوغة (بنفسجي) أو غير مصبوغة ومطلية بستيرات الكالسيوم وبوليمير تشاريكي مصنوع من 70% غليكوليد و 30% لكتيد.

داماكريل 910 لا يعتبر من مولدات الاضداد (الأتبيجينات)، وغير مولد للبيريوجينات، بسبب فقط تفاعلات خفيفة للأنسجة خلال حدوث عملية الامتصاص، يمتص بشكل تام خلال 54-70 يوم، وبالاختبار على الأنسجة الحية يحتفظ بأكثر من 65% من قوة الشد خلال أسبوع من وضعه في وسط موقى .

داماكريل 910 يتوافق مع متطلبات دستور الادوية الأمريكي (U.S.P) ودستور الادوية الأوروبي Ph. Eur.

و توجيهات المفوضية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الطبية EEC/ 42/93.

دواعي الاستعمال :

خيوط **داماكريل 910** يمكن استخدامها في في عمليات تقارب وربط الأنسجة الرخوة العامة، بما في ذلك

الاستخدام في الجراحات العينية.

داماكريل 910 لا يستخدم في عمليات القلب والاعوية الدموية أو الأنسجة العصبية.

موانع الاستعمال :

داماكريل 910 كونه من الخيوط الممتصة، لا ينصح باستخدامه حيث يتطلب تقارب مديد للأنسجة.

تحذيرات :

ينصح قبل استخدام خيوط **داماكريل 910** لإغلاق الجروح، بأن يكون المستخدم على دراية بالإجراءات الجراحية وتقنياتها المتعلقة بالخيوط القابلة للامتصاص، حيث ان تفزر الجرح قد يتفاوت حسب مادة الخيوط المستخدمة وطبيعة النسيج.

على المستخدمين أن يأخذوا بعين الاعتبار أداء الجسم الحي عند اختيار الخيط، استخدام هذه الخيوط قد لا يكون مناسب للمسنين ومرضى سوء التغذية أو الوهن أو المرضى الذين يعانون من حالات قد تؤدي الى تأخير شفاء الجروح.

الاستخدام الإضافي لخيوط جراحية غير ممتصة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجراح وذلك بأغلاق المناطق التي قد تخضع للتوسع أو التمدد أو الانتفاخ أو التي قد تتطلب داعم إضافي .

كما هو الحال مع الاجسام الغريبة، تماس الخيوط لفترة طويلة مع المحاليل الملحية مثل تلك المحاليل المتواجدة في البول أو القنوات الصفراوية ممكن ان تسبب بتشكيل الحصى .

باعتباره خيط قابل للامتصاص، من الممكن لخيوط **داماكريل 910** ان تتصرف بشكل عابر كجسم غريب، ينصح باتباع الممارسات الجراحية المقبولة للسيطرة على الجروح الملوثة أو المصابة .

_تجاهل المنتجات ذات الغلاف المفتوح أو التالف ولا تستخدمها .

_لا تستخدم المنتج الا مرة واحدة .

_لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج .

الاحتياطات (تدابير السلامة)

عند التعامل مع هذا المنتج أو غيره من مواد الخياطة يجب توخي الحذر من تلف المنتج عند الاستخدام تجنب السحق أو تلف دمج الابرة مع الخيط عند تطبيق الأدوات الجراحية مثل الملقط أو حامل الابر.

خيوط **داماكريل 910**، التي تمت معالجتها من أجل تحسين مزايا الاستخدام، تتطلب التقنيات الجراحية المقبولة في العقد المسطحة والدائرية مع ربطات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف الجراحية وخبرة الجراح .

خياطة الجلد التي يجب ان تبقى في مكانها لمدة أكثر من سبعة أيام قد تسبب تهيج موضعي ويجب قصها أو التخلص منها.

في بعض الحالات ولاسيما في جراحات تقويم عظام، تثبيت المفاصل عن طريق دعامات خارجية قد تستخدم حسب تقدير الجراح.

ينصح بأخذ الحيطة عند استخدام الخيوط الممتصة في الأنسجة ذات التروية الدموية المنخفضة فقد يحدث طرد للخيط أو حدوث امتصاص متأخر.