

# DAMACRYL rapid تعليمات الاستخدام

لتجنب تلف رؤوس الابر او منطقة دمج الخيط بالإبرة، يتم قبض الابرة من ثلث الى نصف المسافة من نهاية منطقة اتصال الابرة بالخيط حتى رأس الابرة. إعادة تشكيل الابرة قد يسبب بخسارة قوتها وتصيح أقل مقاومة للثني والكسر.

يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع الابر الجراحية لتجنب حدوث وخزات غير مقصود بها.

تخلص من الابر المستخدمة في حاوية الأدوات الحادة.

تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية او متزايدة.

لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

## التأثيرات الجانبية :

التأثيرات الضارة التي يمكن حصولها عند استخدام هذا المنتج تشمل تفزر الجروح، الفشل في توفير الدعم الكافي للجروح بأغلاق المناطق التي يحدث فيها توسع أو تمدد أو انتفاخ، الفشل في توفير الدعم الكافي للمسنين و مرضى سوء التغذية أو الوهن أو المرضى الذين يعانون من حالات قد تؤدي إلى تأخير شفاء الجروح، العدوى الانتانية، حد منخفض من رد فعل التهابي حاد للأنسجة، تهيج موضعي عند ترك الخيوط لفترة أكثر من سبعة أيام، طرد الخيط أو تأخر الامتصاص في الأنسجة ذات التروية الدموية المنخفضة، تشكل حصي في القنوات البولية و الصفراوية عند حدوث تماس لفترة طويلة مع المحاليل الملحية مثل البول و الصفراء و تهيج موضعي مؤقت في موضع الجرح.

الابر المنكسرة قد تؤدي الى عمليات جراحية مديدة أو إضافية أو بقاء اجزاء من أجسام غريبة، الوخزات غير المقصودة مع الابر الملوثة قد يؤدي الى انتقال مسببات الامراض المنقولة بالدم.

## التعقيم :

خيوط داماكريل رايبيد معقمة بواسطة أوكسيد الإيثيلين.

التعقيم يبقى محفوظ فقط عند فتح المنتج تحت ظروف عقيمة.

لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج.













لا تستخدم المنتج إذا كان الغلاف مفتوح أو تالف.

تخلص من الخيوط المفتوحة غير المستخدمة.

## التخزين :

أبقي المنتج بعيداً عن الرطوبة و الحرارة المباشرة و يوصى ان تكون الظروف التخزينية تحت 25 درجة مئوية، لا تستخدمه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

## الرموز المستخدمة على المنتج

	لا يعاد استخدامه		تاريخ التصنيع
	منتج معقم بواسطة أكسيد الايتلين		تاريخ انتهاء الصلاحية
	لا يعاد تعقيمه لمرة ثانية		رقم الدفعة
	حدود درجة الحرارة		تجنب الرطوبة
	اقرأ التعليمات قبل الاستخدام		لا يستخدم اذا كان الغلاف مفتوح او تالف
	اسم المصنع		تجنب اشعة الشمس المباشرة

## صنع من قبل :

GMD GROUP MEDİKAL SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İKİTELLİ OSB MAH. İSDOK  
SOSYAL TESIS 2 SK. B BLOK 1 B  
7 BASAKSEHIR/ İSTANBUL  
[Info@gmdgroup.com.tr](mailto:Info@gmdgroup.com.tr)  
[www.gmdgroup.com.tr](http://www.gmdgroup.com.tr)

ISO  
9001:2008

ISO  
13485

CE  
2292

## داماكريل رايبيد :

بولي غلاكتين 910-

خيوط مطلي ( مغلف )، مضفور متعدد الليف

خيوط جراحية ممتصة ومعقمة

امتصاص سريع

## الوصف :

خيوط داماكريل رايبيد هي خيوط جراحية صناعية، ممتصة ومعقمة، مكونة من بوليمير تشاركي أعد وصنع من 90% غليكوليد و10% لاكتيد (مستمد من الغلاكتيك وحمض اللاكتيك). هذه الخيوط مضفورة، مصبوغة (بنفسجي) أو غير مصبوغة ومطلية بستيرات الكالسيوم وبوليمير تشاركي مصنوع من 30% غليكوليد و 70% لاكتيد.

داماكريل رايبيد لا يعتبر من مولدات الاضداد (الأنتيجينات)، وغير مولد للبيروجينات، يسبب فقط تفاعلات خفيفة للأنسجة خلال حدوث عملية الامتصاص، يمتص بشكل تام خلال 40-60 يوم، وبالاختبار على الأنسجة الحية يحتفظ بأكثر من 45% من قوة الشد خلال أسبوع من وضعه في وسط موقى .

داماكريل رايبيد يتوافق مع متطلبات دستور الادوية الأمريكي (U.S.P) ودستور الادوية الأوروبي Ph. Eur. و توجيهات المفوضية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الطبية EEC/ 42/93.

## دواعي الاستعمال :

خيوط داماكريل رايبيد يمكن استخدامها في عمليات تقارب وربط الأنسجة الرخوة العامة، بما في ذلك

الاستخدام في الجراحات العينية، حيث يتطلب فقط دعم الجرح على مدى قصير.

داماكريل رايبيد لا يستخدم في عمليات القلب والوعية الدموية أو الأنسجة العصبية.

## موانع الاستعمال :

داماكريل رايبيد كونه من الخيوط الممتصة، لا ينصح باستخدامه حيث يتطلب تقارب مديد للأنسجة.

## تحذيرات :

ينصح قبل استخدام خيوط داماكريل رايبيد لإغلاق الجروح، بأن يكون المستخدمين على دراية بالإجراءات الجراحية وتقنياتها المتعلقة بالخيوط القابلة للامتصاص، حيث ان تفزر الجرح قد يتفاوت حسب مادة الخيوط المستخدمة وطبيعة النسيج.

على المستخدمين أن يأخذوا بعين الاعتبار أداء الجسم الحي عند اختيار الخيط، استخدام هذه الخيوط قد لا يكون مناسب للمسنين و مرضى سوء التغذية أو الوهن أو المرضى الذين يعانون من حالات قد تؤدي الى تأخير شفاء الجروح.

الاستخدام الإضافي لخيوط جراحية غير ممتصة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجراح وذلك بأغلاق المناطق التي قد تخضع للتوسع أو التمدد أو الانتفاخ أو التي قد تتطلب داعم إضافي.

كما هو الحال مع الاجسام الغريبة، تماس الخيوط لفترة طويلة مع المحاليل الملحية مثل تلك المحاليل المتواجدة في البول أو القنوات الصفراوية ممكن ان تسبب بتشكيل الحصى.

باعتباره خيط قابل للامتصاص، من الممكن لخيوط داماكريل رايبيد ان تتصرف بشكل عابر كجسم غريب، ينصح باتباع الممارسات الجراحية المقبولة للسيطرة على الجروح الملوثة أو المصابة.

-تجاهل المنتجات ذات الغلاف المفتوح أو التالف ولا تستخدمها.

-لا تستخدم المنتج الا مرة واحدة.

لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج.

## الاحتياطات (تدابير السلامة)

عند التعامل مع هذا المنتج أو غيره من مواد الخياطة يجب توخي الحذر من تلف المنتج عند الاستخدام تجنب السحق أو تلف دمج الابرة مع الخيط عند تطبيق الأدوات الجراحية مثل الملقط أو حامل الابر.

خيوط داماكريل رايبيد، التي تمت معالجتها من أجل تحسين مزايا الاستخدام، تتطلب التقنيات الجراحية.

المقبولة في العقد المسطحة والدائرية مع ربطات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف الجراحية وخبرة الجراح خياطة الجلد التي يجب ان تبقى في مكانها لمدة أكثر من سبعة أيام قد تسبب تهيج موضعي ويجب قصها أو التخلص منها.

في بعض الحالات ولاسيما في جراحات تقويم عظام، تثبيت المفاصل عن طريق دعامات خارجية قد تستخدم حسب تقدير الجراح.

ينصح بأخذ الحيطة عند استخدام الخيوط الممتصة في الأنسجة ذات التروية الدموية المنخفضة فقد يحدث طرد للخيط أو حدوث امتصاص متأخر.