

# DAMACRYL تعلیمات الاستخدام

ينصح بأخذ الحيطة عند استخدام الخيوط الممتصصة في الأنسجة ذات التروية الدموية المنخفضة فقد يحدث طرد للخيط أو حدوث امتصاص متأخر.

لتجنب تلف رؤوس الابر او منطقة دمج الخيط بالإبرة، يتم قبض الإبرة من ثلث الى نصف المسافة من نهاية منطقة اتصال الإبرة بالخيط حتى رأس الإبرة. إعادة تشكيل الإبرة قد يسبب بخسارة قوتها وتصبح أقل مقاومة للثنى والكسر.

يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التعامل مع الابر الجراحية لتجنب حدوث وخزات غير مقصود بها.

تخلص من الابر المستخدمة في حاوية الأدوات الحادة.

تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية او متزايدة.

لا تستخدم المنتج بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.

## التأثيرات الجانبية :

التأثيرات الضارة التي يمكن حصولها عند استخدام هذا المنتج تشمل تفzer الجروح، الفشل في توفير الدعم الكافي للجروح بأغلاق المناطق التي يحدث فيها توسيع أو تمدد أو انتفاخ، الفشل في توفير الدعم الكافي للمسنين ومرضى سوء التغذية او الوهن او المرضى الذين يعانون من حالات قد تؤدي الى تأخير شفاء الجروح، العدوى الانتانية ، حد منخفض من رد فعل التهابي حاد للأنسجة، تهيج موضعی عند ترك الخيوط لفترة أكثر من سبعة أيام، طرد الخيط أو تأثر الامتصاص في الأنسجة ذات التروية الدموية المنخفضة، تشكل حصى في القنوات البولية و الصفراوية عند حدوث تماس لفترة طويلة مع المحاليل الملحة مثل البول و الصفراء و تهيج موضعی مؤقت في موضع الجرح.

الابر المنكسرة قد تؤدي الى عمليات جراحية مديدة أو إضافية أو بقاء اجزاء من أجسام غريبة، الوخزات غير المقصودة مع الابر الملوثة قد يؤدي الى انتقال مسببات الامراض المنقوله بالدم .

## التعقيم :

خيوط داماکریل معقمة بواسطة أوكسيد الإيثلين.

التعقيم يبقى محفوظ فقط عند فتح المنتج تحت ظروف عقيمة.

لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج.

لا تستخدم المنتج إذا كان الغلاف مفتوح او تالف.

تخلص من الخيوط المفتوحة غير المستخدمة.

## التخزين :

أبقي المنتج بعيدا عن الرطوبة و الحرارة المباشرة و يوصى ان تكون الظروف التخزينية تحت 25 درجة مئوية، لا تستخدمه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية .

## الرموز المستخدمة على المنتج



لا يعاد مستخدماه



تاريخ التصنيع



منتج معقم بواسطة  
أوكسيد الایتلین



تاريخ انتهاء الصلاحية



رقم الدفعه



حدود درجة الحرارة



تجنب الرطوبة



اقرأ التعليمات قبل  
الاستخدام



تجنب اشعة الشمس  
المباشرة



اسم المصنع



لا يستخدم اذا كان الغلاف  
مفتوح او تالف

## صنع من قبل :

GMD GROUP MEDİKAL SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

IKİTELLİ OSB MAH. İSDOK  
SOSYAL TESİS 2 SK. B BLOK 1 B  
7 BASAKSEHIR/ İSTANBUL  
[info@gmdgroup.com.tr](mailto:info@gmdgroup.com.tr)  
[www.gmdgroup.com.tr](http://www.gmdgroup.com.tr)



## داماكرييل :

بولي حمض الغليكوليك

خيط مطلي ( مخلف ) ، مضفر متعدد الليف

خيوط جراحية ممتصة ومعقمة

## الوصف :

خيوط داماکریل هي خيوط جراحية صناعية، ممتصة ومعقمة، مكونة من بوليمر أحادي أعد وصنع من 100% حمض الغليكوليك. هذه الخيوط مضفرة، مصبورة (بنفسجي) أو غير مصبورة ومطلية بالبولي كابرولاتكتون وستيرات الكالسيوم.

داماكرييل لا يعتبر من مولدات الأضداد (الأنتيجينات)، وغير مولد للبيروجينات يسبب فقط تفاعلات خفيفة للأنسجة خلال حدوث عملية الامتصاص يمتص بشكل تام خلال 60-90 يوم، وبالاختبار على الانسجة الحية يحتفظ بحوالي 65% من قوة الشد خلال أسبوع من وضعه في وسط موق.

داماكرييل يتوافق مع متطلبات دستور الادوية الأمريكي (U.S.P) ودستور الادوية الأوروبي Ph. Eur. و توجيهات المفوضية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الطبية 42/93 EEC.

## دواعي الاستعمال :

خيوط داماکریل يمكن استخدامها في عمليات تقارب وربط الأنسجة الرخوة العامة. ولا يستخدم داماکریل في عمليات القلب والأوعية الدموية أو الأنسجة العصبية.

## موانع الاستعمال :

داماكرييل كونه من الخيوط الممتصصة، لا ينصح باستخدامه حيث يتطلب تقارب مديد للأنسجة.

## تحذيرات :

ينصح قبل استخدام خيوط داماکریل لإغلاق الجروح، بأن يكون المستخدمين على دراية بالإجراءات الجراحية وتقنياتها المتعلقة بالخيوط القابلة للامتصاص، حيث ان تفzer الجرح قد يتفاوت حسب مادة الخيوط المستخدمة وطبيعة النسيج.

على المستخدمين أن يأخذوا بعين الاعتبار أداء الجسم الحي عند اختيار الخيط، استخدام هذه الخيوط قد لا يكون مناسب للمسنين ومرضى سوء التغذية أو الوهن أو المرضى الذين يعانون من حالات قد تؤدي إلى تأخير شفاء الجروح.

الاستخدام الإضافي لخيوط جراحية غير ممتصة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجراح وذلك بأغلاق المناطق التي قد تخضع للتلوّس أو التمدد أو الانتفاخ أو التي قد تتطلب داعمًا إضافيًّا.

كما هو الحال مع الأجسام الغريبة، تماس الخيوط لفترة طويلة مع المحاليل الملحة مثل تلك المحاليل المتواجدة في البول أو القنوات الصفراوية ممكّن أن تسبّب بتشكل الحصى.

باعتباره خيط قابل للامتصاص، من الممكن لخيوط داماکریل أن تتصرف بشكل عابر كجسم غريب، ينصح باتباع الممارسات الجراحية المقبولة للسيطرة على الجروح الملوثة أو المصابة.

تجاهل المنتجات ذات الغلاف المفتوح أو التالف ولا تستخدمها.

لا تستخدم المنتج إلا مرة واحدة.

لا تقوم بإعادة تعقيم المنتج.

## الاحتياطات (تدابير السلامة)

عند التعامل مع هذا المنتج أو غيره من مواد الخياطة يجب توخي الحذر من تلف المنتج عند الاستخدام. تجنب السحق أو تلف دمج الإبرة مع الخيط عند تطبيق الأدوات الجراحية مثل الملقط أو حامل الإبر.

خيوط داماکریل، التي تمت معالجتها من أجل تحسين مزايا الاستخدام، تتطلب التقنيات الجراحية المقبولة في العقد المسطحة والدائري مع ربطات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف الجراحية وخبرة الجراح.

خياطة الجلد التي يجب أن تبقى في مكانها لمدة أكثر من سبعة أيام قد تسبب تهيج موضعی ويجب قصها أو التخلص منها.

في بعض الحالات ولاسيما في جراحات تقويم عظام، تثبت المفاصل عن طريق داعمات خارجية قد تستخدم حسب تقدير الجراح.